



# Nowa płytka Stomahesive plastyczna (cz. I)

Po zabiegu wyłonienia stomii każdy pacjent zastanawia się: „Jaki sprzęt mam wybrać?“, „Jak prawidłowo go stosować?“, „Jak uchronić się przed powikłaniami skórnymi?“. Z kolei osoby bardziej doświadczone często mają wątpliwości, czy używany przez nich sprzęt jest wystarczająco dobry i zastanawiają się, co mogliby zrobić, aby płytki jeszcze lepiej przylegały do stomii.

Wszystkie osoby ze stomią w codziennym życiu borykają się z podobnymi problemami, gdyż stosowany przez nich sprzęt stomijny nie zawsze jest właściwie dopasowany.

### Idealne dopasowanie

Prawidłowo dobrany i dopasowany sprzęt stomijny powinien ściśle przylegać do skóry, a przestrzeń między stomią a krawędzią otworu w płytce stomijnej powinna być jak najmniejsza, by nie dochodziło do podciekania treści jelitowej pod płytkę i w następstwie tego do zapalenia skóry wokół stomii.

Nawet niewielka przerwa wystarczy czasami, aby treść jelitowa zetknęła się ze skórą, w wyniku czego dochodzi do jej podrażnienia. To z kolei bardzo często bywa powodem zapalenia.

### Ochrona skóry

Niewłaściwe dopasowanie płytki stomijnej jest jedną z najczęstszych przyczyn powikłań skórnych u stomików. Badania wykazały, że ok. 45% pacjentów uskarża się na zapalenie skóry wokół stomii.


Stwierdzono, że właściwe dopasowanie płytki do kształtu i wielkości stomii istotnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia skóry i jest kluczowe dla jej ochrony.

### Płytki plastyczne

Płytki plastyczne Stomahesive to najnowszy produkt firmy ConvaTec dla osób z każdym rodzajem stomii, bez względu na jej rozmiar i kształt. Dostępna jest w systemie dwuczęściowym Combihesive 2S.

Otula szczelnie stomię i zapewnia idealne dopasowanie do jej kształtu i wielkości.

Zapewnia to lepszą ochronę, powoduje mniej powikłań skórnych i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

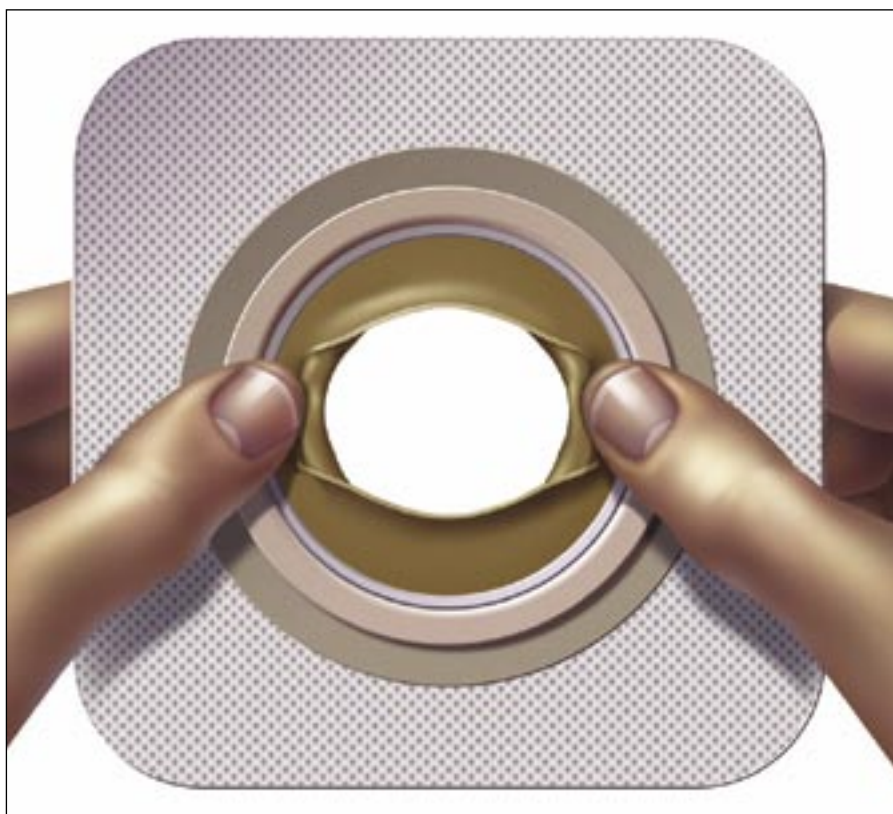

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

**Delikatny, miękki i plastyczny materiał nowej płytki Stomahesive łatwo jest uformować palcami tak, by idealnie pasował do wielkości i kształtu posiadanej stomii.**

### Trzy warstwy

Nowe płytki plastyczne Stomahesive są zbudowane z trzech warstw.

Zewnętrzna warstwa jest wykonana z materiału Durahesive®, który dopasowuje się do kształtu i wielkości stomii, dzięki czemu skutecznie chroni przed podciekaniem.

Środkowa warstwa polietylenowa zapewnia elastyczność i dzięki efektowi pamięci umożliwia dopasowanie wielkości otworu do kształtu stomii, który zmienia się w ciągu dnia.

Warstwa przylepna płytki (od strony skóry) wykonana jest z materiału Stomahesive®, który chroni skórę przed uszkodzeniem i podrażnieniami. Ma też właściwości gojące, co jest szczególnie ważne dla osób z podrażnieniami lub zapaleniem skóry.

**Technologia płytek plastycznych ConvaTec pozwoli odkryć korzyści z idealnego dopasowania sprzętu do wielkości i kształtu stomii.**


## Korzyści

Nowe płytki plastyczne Stomahesive oferują wiele korzyści:

- **Właściwości gojące** – płytki plastyczne są wykonane z materiału Stomahesive®, który zapewnia skórze ochronę i wspomaga gojenie.
- **Ochrona skóry** – płytki plastyczne dokładnie dopasowują się do wielkości i kształtu stomii, co minimalizuje ryzyko kontaktu treści jelitowej lub moczu ze skórą.
- **Idealne dopasowanie** – płytki plastyczne stale dopasowują się do zmieniającej się w ciągu dnia wielkości stomii, dobrze do niej przylegają, zapewniając szczelność.
- **Wygoda** – płytki plastyczne są łatwe w użyciu i nie wymagają docinania nożyczkami.
- **Uniwersalność** – płytki plastyczne można stosować do zaopatrzenia praktycznie każdego rodzaju stomii.
- **Higiena** – płytki plastyczne ułatwiają wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
- **Prostota użycia** – łatwo się nauczyć, jak je stosować.

Nowe płytki dostępne są w najpopularniejszym na rynku systemie dwuczęściowym Combi-hesive 2S, z którego korzysta z nich wiele osób. Polecane są one oczywiście także użytkownikom sprzętu jednoczęściowego.

Płytki szczelnie otula stomię, co zapewnia mniej powikłań skórnych i daje poczucie bezpieczeństwa.

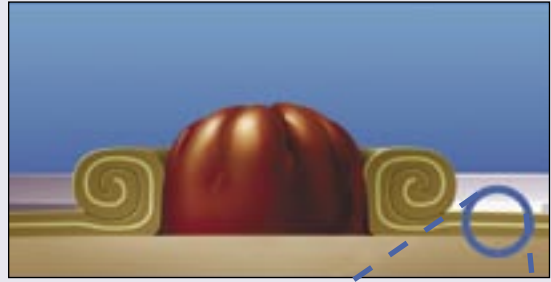

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

**ZEWNĘTRZNA WARSTWA** płytki z materiału Durahesive® zapewnia idealne dopasowanie płytki do stomii i skutecznie chroni przed podciekaniem.

**ŚRODKOWA WARSTWA** polietylenowa zapewnia elastyczność i dzięki efektowi pamięci poprawia dopasowanie płytki do wielkości stomii.

**WARSTWA PRZYLEPNA** z materiału Stomahesive® przylega do skóry, chroniąc ją przed uszkodzeniem i podrażnieniami.

Płytki plastyczne Stomahesive składa się z trzech warstw. Każda z nich pełni inną funkcję.

Stomia OKRĄGŁA



Stomia OWALNA



Stomia NIEREGULARNA



Za pomocą nowych płytek plastycznych Stomahesive można bez problemu zaopatrzyć stomię o różnym kształcie i wielkości.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

PLASTYCZNY MATERIAŁ PŁYTKI OTULA STOMIĘ PRZEZ CAŁY CZAS JEJ NOSZENIA, DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CIĄGU DNIA WIELKOŚCI STOMII.



Elastyczność materiału nowych płytek plastycznych pozwala na ich idealne dopasowanie się do zmieniającej się w ciągu dnia wielkości stomii.

FOT. ARCHIWUM CONVATEC

## Gdzie kupić?

Płytki plastyczne Stomahesive są dostępne w sklepach medycznych współpracujących z firmą ConvaTec na terenie całego kraju. Ich lista oraz adresy są podane na str. 22 „Naszej Troski”.

Cena płytek plastycznych Stomahesive jest atrakcyjna – identyczna jak płytek Stomahesive systemu Combi-hesive 2S. Wynosi 19,15 zł za sztukę.

Płytki plastyczne Stomahesive wydawane są osobom ze stomią bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny.

## Płytki plastyczne Stomahesive – dostępne rozmiary i ceny

Rozmiar (w mm)	Cena brutto (za 1 szt.)
45/13-22 mm	19,15
45/22-33 mm	19,15
57/33-45 mm	19,15
70/45-56 mm*	19,15

\* największy rozmiar płytki plastycznej Stomahesive będzie dostępny dopiero od września br.